



**GRUPO  
CORPORINTER®**  
DETECCIÓN OPORTUNA®



# CHEMTRUE

Pruebas para la Detección de drogas en orina

Las pruebas rápidas **Chemtrue** son utilizadas para la **detección cualitativa** simultánea de **drogas o metabolitos** de las mismas con puntos de corte preestablecidos.

Reg. Sanitario  
Multipanel 0534R2017SSA | Vaso 0535R2017SSA



## PROCEDIMIENTO

### • Vaso

1. Saque la prueba del empaque y utilícela lo más pronto posible.
2. Recolecte la orina en el vaso. (La orina debe llegar al nivel mínimo señalado)
3. Cierre el vaso y coloque en una superficie plana.
4. Retire la etiqueta desprendible.
5. Los resultados deberán leerse de 5 a 8 min.

### • Multipanel

1. Recolecta la muestra con orina fresca en un vaso estéril. (No suministrado con las pruebas)
2. Quite la tapa del extremo de la tarjeta de prueba.
3. Sumerje la tarjeta verticalmente en la orina de 10 a 15 seg.
4. Cubra el cassette con la tapa y colóquelo en una superficie plana.
5. Los resultados deberán leerse de 5 a 8 min.



## PRESENTACIÓN

- Multipanel  
**25 dispositivos** de prueba.  
(2, 3, 4, 5, 6 o 9 Parámetros)
- **25 vasos** de prueba.  
3 y 5 Parámetros



## INTERPRETACIÓN

- Resultados rápidos y confiables **5 - 8 min.**



NEGATIVO

POSITIVO

INVALIDO



## DROGAS APLICADAS

PRUEBA	CORTE
Opiáceos (OPI)	2000 ng/mL
Anfetamina (AMP)	1000 ng/mL
Metanfetamina (MET)	1000 ng/mL
Cocaína (COC)	300 ng/mL
Benzodiazepinas (BZO)	300 ng/mL
Barbitúricos (BAR)	300 ng/mL
Metadona (MTD)	300 ng/mL
Marihuana (THC)	50 ng/mL
Fenciclidina (PCP)	25 ng/mL

## CORPORATIVO

Prolongación Avenida Tepeyac No. 110, Sec. A, Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México. | T. (33) 2002-6555

[corporinter.com](http://corporinter.com)

## AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS

223300202C3176

\*Publicidad dirigida a profesionales de la salud  
Consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso