



**GRUPO  
CORPORINTER®**  
DETECCIÓN OPORTUNA®



SD BIOSENSOR

STANDARD

Prueba Rápida Standard™ Q

# COVID-19 IgM/IgG Plus Test

Es un **inmunoensayo rápido** para la detección presuntiva cualitativa de anticuerpos específicos contra **SARS-CoV2 (COVID-19)** presentes en sangre entera capilar o venosa, suero o plasma de origen humano.

Esta prueba debe ser aplicada sólo por profesionales de la salud, para diagnóstico *in vitro*.

## PRESENTACIÓN

- 25 Dispositivos de prueba
- Botella Buffer
- 25 tubos capilares
- Instructivo de uso



Aviso Comercialización  
CAS/DEAPE/7247/2022



## ESPECIFICACIONES

Tipo de muestra:

- Sangre entera capilar o venosa
- Suero o plasma (EDTA o Citrato de Sodio)

Tiempo del proceso: **10 a 15 minutos máximo.**

**Sensibilidad: 99.03%**

**Especificidad: 98.65%**

Almacenamiento: **2° - 30°C.**



## PROCEDIMIENTO

- 1. Recolecte la muestra de su elección**  
20 µl de sangre entera capilar o venosa  
10 µl de suero o plasma
- 2. Deposite la muestra en el dispositivo de prueba**  
20 µl de sangre entera capilar o venosa  
10 µl de suero o plasma
- 3. Deposite el buffer en el dispositivo de prueba**  
Inmediatamente añada 3 gotas (90 µl) de buffer verticalmente dentro del pocillo
- 4. Tiempo de lectura**  
Lea el resultado de la prueba en 10-15 minutos máximo del tiempo indicado.




## INTERPRETACIÓN


### • Negativo



### • Positivo

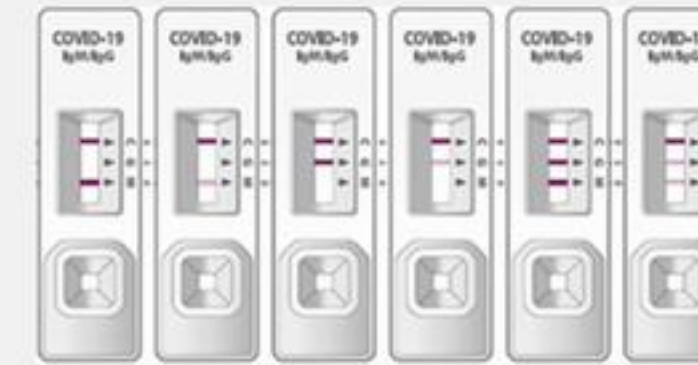

### • Inválido

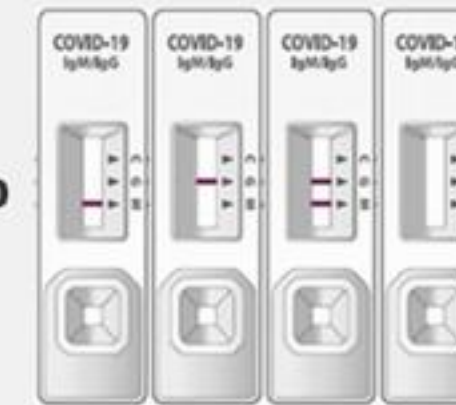

## BENEFICIOS

- Apto para puntos de atención.
- Mínima cantidad de muestra de sangre entera capilar o venosa, suero o plasma.
- Resultados a partir de 10 minutos
- Almacenamiento a temperatura ambiente

## ESTABLECIMIENTO

Prolongación Avenida Tepeyac No. 110 Sec. B Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México. | T. (33) 2002-6555

[corporinter.com](http://corporinter.com)

\*Publicidad dirigida a profesionales de la salud

## AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS

Consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso