



**GRUPO  
CORPORINTER®**  
DETECCIÓN OPORTUNA®



SD BIOSENSOR

STANDARD

# Prueba Rápida Standard™ Q COVID-19 Ag

Es un inmunoensayo cromatográfico para la **detección cualitativa del antígeno** específico contra **SARS-CoV2** presente en la nasofaringe humana.

Esta prueba debe ser aplicada sólo por profesionales de la salud, para diagnóstico *in vitro*.

## PRESENTACIÓN

- 25 Dispositivos
- 25 Hisopos estériles
- 25 solución amortiguadora con su tapa de la boquilla
- Instrucciones de uso



Aviso Comercialización  
CAS/SESSDM/17908/2020



## ESPECIFICACIONES

Tipo de muestra:  
**Nasofaríngea.**

Tiempo del proceso: **15 a 30 minutos máximo.**

**Sensibilidad: 93.12%**  
**Especificidad: 100%**



## PROCEDIMIENTO

1. Recolecte la muestra nasofaríngea.
2. Mezcle con el solución amortiguadora y gire el hisopo al menos 5 veces.
3. Deposite 3 gotas de la mezcla homogeneizada en forma vertical.
4. Interprete resultados.



## INTERPRETACIÓN

Negativo	
Positivo	
Inválido	



## VENTAJAS

- Reactivos Listos para usar.
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios - **COFEPRIS**
- Instituto de Diagnostico y Referencias Epidemiologicas - **InDRE**
- Organizacion Mundial de la Salud - **OMS**

## CORPORATIVO

Prolongación Avenida Tepeyac No. 110 Sec. B Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México. | T. (33) 2002-6555

[corporinter.com](http://corporinter.com)

\*Publicidad dirigida a profesionales de la salud

## AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS

223300202C3900

Consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso