



**GRUPO
CORPORINTER®**
DETECCIÓN OPORTUNA®

ADVANCED QUALITY™



Advanced Quality™

Prueba de un paso
HIV 1&2, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C

Los reactivos son un ensayo inmunocromatográfico con oro coloidal para la **detección cualitativa** de **anticuerpos** contra de los virus inmunodeficiencia humana, Hepatitis C, *Treponema pallidum* y el **antígeno** del virus de la Hepatitis B.



Reg. Sanitario
Prueba HIV 2875R2013SSA
Prueba Sífilis 0293R2012SSA
Prueba Hepatitis B 2581R2013SSA
Prueba Hepatitis C 3095R2013SSA



PRESENTACION HIV 1&2, HCV y TP

- **40 cassettes** en bolsas individuales de papel aluminio con un gotero de plástico y un desecante.
- **4 diluyentes** de muestra.
- **Instructivo de uso**

HBsAg

No utiliza diluyente.




RESULTADOS HIV 1&2, HCV y HBsAg

• El resultado de la prueba se interpreta entre **5 - 10 min.**

TP / Sífilis

• El resultado de la prueba se interpreta entre **15 - 20 min.**

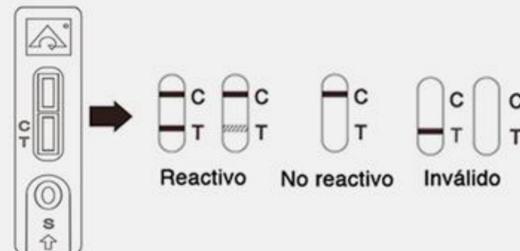

No interprete el resultado antes o después del tiempo establecido.



FUNCIONES

- Las pruebas se deben almacenar de 2-30°C.
- Las muestras de sangre deben ser usadas inmediatamente.
- Suero o plasma debe ser refrigerado si no es utilizado el mismo día.



EVALUACIÓN InDRE

HIV 1&2 (Ab)	Sensibilidad: 100% Especificidad: 99.71%
TP (Ab)	Sensibilidad: 98.75% Especificidad: 94.16%
HBsAg (Ag)	Sensibilidad: 92% Especificidad: 100%
HCV (Ag)	Sensibilidad: 97.5% Especificidad: 98.75%

CORPORATIVO

Prolongación Avenida Tepeyac No. 110, Sec. A, Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México. | T. (33) 2002-6555

corporinter.com

AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS

223300202C3172

*Publicidad dirigida a profesionales de la salud
Consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso