



GRUPO CORPORINTER
DETECCIÓN OPORTUNA®

STANDARD™ LipidoCare

Analizador para la determinación cuantitativa de parámetros como: Colesterol total, HDL, Triglicéridos y Glucosa en tiras paramétricas que realizan un perfil de lípidos en sangre entera; capilar o venosa, suero o plasma. Sistema basado en la **fotometría de reflectancia** para **perfil lipídico** y **electroquímica** para **glucosa**.

PRESENTACIÓN EQUIPO

- 1 Analizador
- 1 Tira de comprobación de lípidos
- 1 Tira de comprobación de glucosa
- 4 baterías AAA 1.5V
- 1 Manual de uso
- 1 Guía Rápida

TIRAS REACTIVAS PERFIL DE LÍPIDO

- 25 tiras reactivas
- Chip codificador
- Inserto

TIRAS REACTIVAS GLUCOSA

- 50 tiras reactivas
- Chip codificador
- Inserto

STANDARD
LipidoCare®



SD BIOSENSOR



Reg. Sanitario
Equipo 0347E2014SSA
Tira Reactiva Lípido 0521R2014SSA
Tira Reactiva Glucosa 2493R2014SSA



ESPECIFICACIONES

- Tiempo de análisis:
3 minutos para perfil lipídico
5 segundos para perfil de glucosa
- Memoria de datos para **500 resultados**.
- Sangre entera; capilar y venosa, suero o plasma (EDTA y heparina).




PROCEDIMIENTO

- Coloque el chip.
- Inserte la tira reactiva en el analizador.
- Realice la punción.
- Recolecte los 35 µl de muestra y 0.9 µl para glucosa.
- Deposite la muestra en el pocillo.
- Cierre la tapa protectora y espere 3 min para obtener resultados para perfil lipídico y 5 seg para glucosa.



VENTAJAS

- Fuente de energía: Baterías alcalinas.
- Cuenta con software de manejo de lípidos.

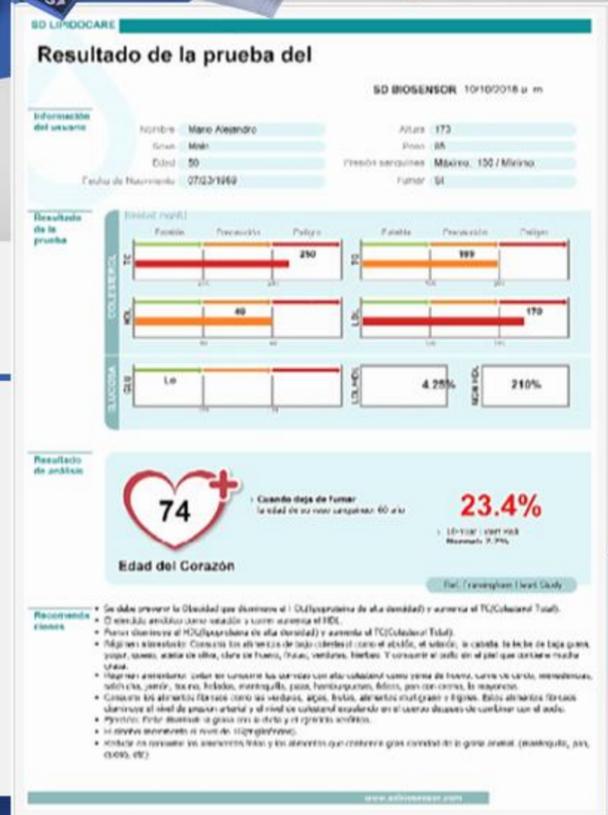

CORPORATIVO

Prolongación Avenida Tepeyac No. 110 Sec. B Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México. | T. (33) 2002-6555

corporinter.com

*Publicidad dirigida a profesionales de la salud

AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS

223300202C3894

Consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso